

The Smart Block

Instructions for Application

Prep the Hoof

Trim hoof flat. Make sure hoof is completely dry and debris free.

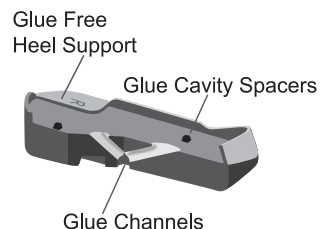


Figure 2

It is recommended to apply a thin strip of glue on the white line of the axial and abaxial wall of the hoof or block and fill any hollow spaces. See Figure 2.

Hold the Block in Place

Quickly place and hold the block on the hoof and insert the glue tip into the glue injection hole located on the bottom of the block.



Inject Glue

Inject 1-2 pumps of glue* in the glue canal. This ensures maximum glue coverage is achieved without waste.

Hold the block in place at least 30 seconds or manufacturers recommended curing time.



*Use any 2 part Urethane Block adhesive.

For questions or comments please call Martin VanBeek at 575-749-0846 or see our website www.thesmartblock.com.

Thank you for choosing The Smart Block.

The Smart Block

Instrucciones Para la Aplicación

Prepare la Pezuña

Recorte la pezuña plana, asegúrese que la pezuña este completamente seca y limpia.

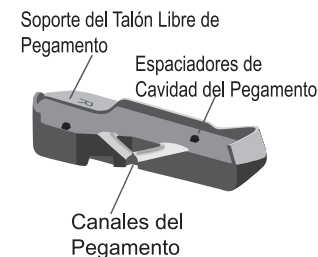


Figura 2

Es recomendable que aplique una pequeña tira de pegamento en la línea blanca de la pared axial (interior) y abaxial (exterior) de la pezuña o bloque para llenar cualquier espacio vacío. Vease figura 2.

Sostenga el bloque en su lugar

Rapidamente coloque y sostenga el bloque en la pezuña, introduzca la punta del pegamento en el orificio de inyección localizado en la parte de abajo del bloque.



Inyectar el Pegamento

Inyecte 1-2 bombas de *pegamento en el canal. Esto asegura una máxima cobertura sin desperdicio. Sostenga el bloque en su lugar por 30 segundos o el tiempo de curado recomendado por el fabricante del pegamento.



*Utilice cualquier adhesivo de bloque que contenga uretano de dos partes.

Para preguntas o comentarios favor de llamar a Martin Vanbeek al 575-749-0846 o visite nuestra pagina de internet en www.thesmartblock.com.

Gracias por elegir The Smart Block.